

HOE BRENG JE HET MASKER AAN?



Reinig uw handen met zeep en water of ontsmettingsmiddel voordat u het masker aanraakt.



Haal een masker uit de doos en zorg ervoor dat er aan beide kanten van het masker geen duidelijke scheuren of gaten zijn. Spreid dan het masker uit en hang het aan beide kanten aan de oren.



De zijkant van het masker met een stijve buigbare rand is de bovenkant en is bedoeld om zich naar de vorm van de neus te vormen. Zet de neusstrip vast om te voorkomen dat er vuile lucht binnendringt.



Trek het masker naar beneden om uw kaak te bedekken zodat u gemakkelijk kunt ademen.



Raak de voorkant van het masker niet aan tijdens de gebruik. De voorkant van het masker is vervuild. Raak alleen de oorlussen aan indien nodig.

HOE VERWIJDER JE HET MASKER?



Reinig uw handen met zeep en water of ontsmettingsmiddel voordat u het masker aanraakt.



Raak de voorkant van het masker niet aan. De voorkant van het masker is vervuild. Raak alleen de oorlussen aan.



Houd beide oorlussen vast en til het masker voorzichtig op en verwijder het.



Gooi het masker in de prullenbak.



Maak de handen schoon met water en zeep of ontsmettingsmiddel